


GlucoContro.online Käyttöopas terveydenhuollon ammattilaisille

(Versio 2.0, syyskuu 2022)

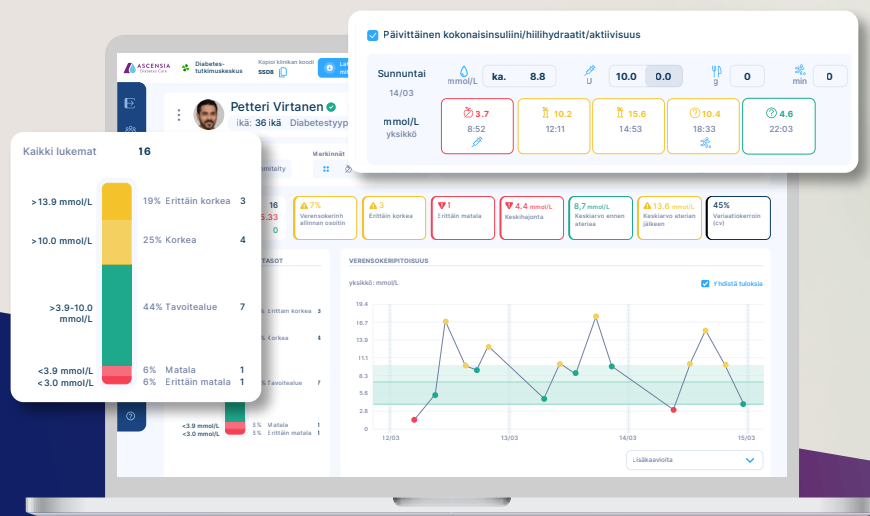

Sisällys

Aihe	Sivu
Ohjelmaan kirjautuminen.....	1
Potilaan löytäminen	2
Uuden potilaan lisääminen	3
Potilastietojen muokkaaminen	4
Käyntimuistiinpanot	5-6
Klinikan asetusten hallinta	7
Terveystietojen ammattilaisen lisääminen	8
Mittarilukemien tuonti	9
Näytön asettelun yleiskatsaus	10
Tietonäkymien mukauttaminen	11
Raporttien luominen	12
Viestit	13
Ohje, tuki ja palaute	14

Ohjelmaan kirjautuminen

- 1 Avaa verkkoselain, esim. Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge jne.
- 2 Mene osoitteeseen <https://glucocontro.online/>
- 3 Luo tili tai kirjaudu sisään.



Kirjaudu Asensian sivuille

Potilas

Ammattilainen

Sähköpostiosoite

Syötä sähköpostiosoite

Salasana

[Unohditko salasanasasi?](#)

Syötä salasana

☐ Muista minut

Kirjaudu sisään

Eikö sinulla ole tiliä? [Luo tili](#)



Potilaan löytäminen

Potilas voidaan löytää kolmella eri tavalla

1 Napsauta Täydellinen potilaslista -kuvaketta

Jos haluat kaventaa hakuä käytä mitä tahansa neljästä hakuruudusta. Sarakkeita voi lajitella nousevaan ja laskevaan järjestykseen napsauttamalla kaksipäistä nuolta. Kun potilas löytyy, napsauta hänen nimeään.

Potilaan nimi	Syntymäaika	Sähköpostiosoite	Johtavan ammattilaisen nimi	Maksaja
Liisa Järvinen			Aki Salmi	Maksaja
Aino Mäkinen	9 fév 1997		Aki Salmi	Maksaja
Topi Nieminen			Aki Salmi	Maksaja
Henna Laaksonen			Aki Salmi	Maksaja
Aleksi Järvelä	24 mars 1964		Aki Salmi	Maksaja
Maija Kallio			Aki Salmi	Maksaja

2

Kirjoita etsittävän potilaan nimi tai tunnus. Kun alat kirjoittamaan, alkaa ohjelma automaattisesti etsiä ja näyttää osumia. Mitä enemmän kirjoitat, sitä tarkempi haku on. Kun löydät potilaan, napsauta hänen nimeään.

al

- AJ Aleksi Järvinen
- AJ Aleksi Järvelä
- OH Onni Huhtala

3 Napsauta Potilasluettelo-kuvaketta ja sivupalkki tulee näkyviin


Voit joko valita potilaan luettelosta, jos nimi näkyy, tai alkaa kirjoittaa hänen nimeään tai potilastunnustaan hakuruutuun. Kun alat kirjoittaa, ohjelma etsii automaattisesti ja näyttää osumat. Mitä enemmän kirjoitat, sitä enemmän haku tarkentuu. Kun näet potilaan, napsauta hänen nimeään.

Potilaat

Etsi potilasta nimellä tai tunnuksella

- Liisa Järvinen
- Aino Mäkinen
- Topi Nieminen
- Henna Laaksonen
- Aleksi Järvelä
- Maija Kallio
- Valtteri Koski
- Sari Peltola
- Onni Huhtala

Näytä lisää

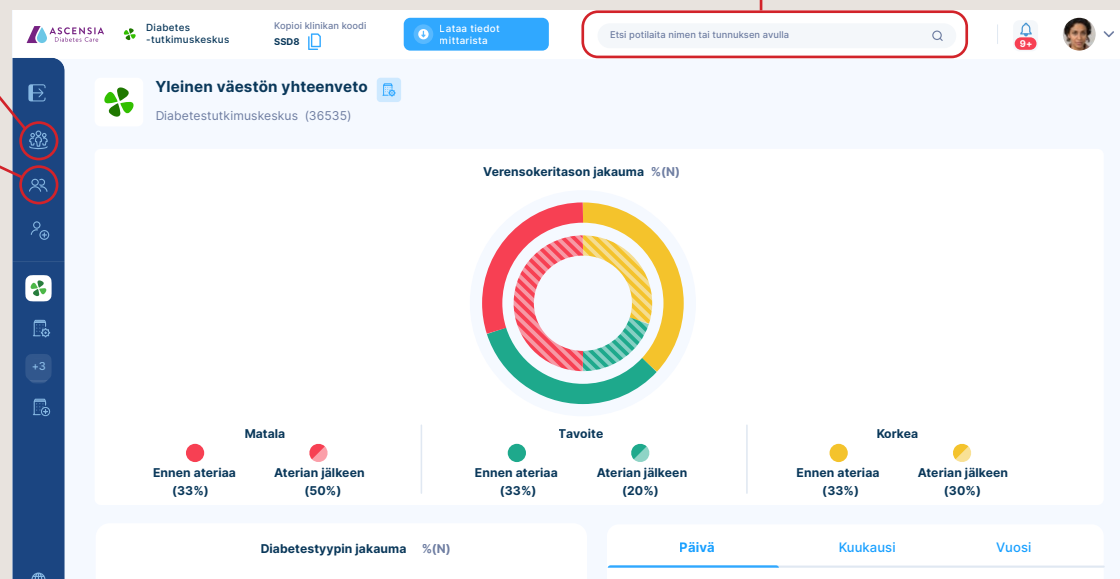

Uuden potilaan lisääminen

Uuden potilaan lisäämiseen on kolme vaihtoehtoa

1 Klinikan koodi

Anna ainutlaatuinen klinikkakoodi potilaillesi. He voivat myöhemmin käyttää tätä koodia kirjautuessaan sisään GlucoContro.online-palveluun rekisteröityäkseen klinikalle. Kun potilas on rekisteröitynyt, voit hyväksyä hänen rekisteröintipyyntönsä.

2 QR koodi

Napsauta QR-koodia. Potilas voi skannata QR-koodin näytöltäsi mobiililaitteellaan. Tämä voidaan tehdä suoraan kamerasta useimmilla laitteilla, eikä se vaadi erityistä sovellusta. Potilas voi sitten ilmoittautua GlucoContro.online-sivustolle, ja hänet linkitetään klinikkaasi.

3 Manuaalinen syöttö

Kirjaa potilaan etu- ja sukunimi. Tämä on vähimmäistieto, joka tarvitaan uuden potilaan lisäämiseen.

Syötettyäsi tarvittavat tiedot, paina **“Lisää uusi potilas”**.

The image shows the GlucoContro.online interface. At the top, there's a header with the Ascensia Diabetes Care logo and a 'Diabetes-tutkimuskeskus' (Diabetes research center) label. A 'Kopioi klinikan koodi' (Copy clinic code) button is visible. Below the header, there's a 'Yleinen väestön yhteenveto' (General population summary) section for 'Diabetestutkimuskeskus (36535)'. A 'Verensokeritason jakauma' (Blood sugar distribution) chart is shown, with a 'Korkea' (High) label and a 'Kutsu GlucoContro.online-käyttäjää jakamaan tietoja' (Invite GlucoContro.online user to share data) message. The 'Lisää uusi potilas' (Add new patient) form is open, showing two tabs: 'Manuaalinen' (Manual) and 'QR-koodi' (QR code). The 'Manuaalinen' tab is active, showing fields for 'Etunimi' (First name), 'Sukunimi' (Last name), 'Osoite' (Address), and 'Maa' (Country). The 'QR-koodi' tab shows a QR code. The background shows a dashboard with a 'Verensokeritason jakauma' (Blood sugar distribution) chart and a 'Kutsu GlucoContro.online-käyttäjää jakamaan tietoja' (Invite GlucoContro.online user to share data) message.

Potilastietojen muokkaaminen

ASCENSIA Diabetes Care | Diabetes-tutkimuskeskus | Kopioi klinikan koodi SSD8 | Lataa tiedot mittarista | Etsi potilaita nimen tai tunnuksella | AGP-näkymä | Luo raportti | 9+ | [Profiili]

Petteri Virtanen ✓ **Synkronoitu**
ikä: 36 ikä Diabetestyyppi: Tyypin 1 Hoitomuoto: Insuliini **Vastaanoton merkinnät** **Aloita vastaanotto**

Tulosten kuvaus: **Kaikki** Yhteenveto Ryhmitelty | Merkinnyt: [Merkinnät] | Tulosten ajanjakso: **3 päivää** 7 päivää 14 päivää 30 päivää 3 kuukautta Kaikki Uudet tulokset 12/03 - 14/03

Pääset muokkaamaan potilastietoja klikkaamalla kolmea pistettä.

Petteri Virtanen

Muokkaa potilasprofiilia

Käyntihistoria

Päivitä tiedot

Henkilötiedot | **Terveystiedot** | Glukoositasot | KPI

Diabetestyyppi
Ei vastausta

Hoitomuoto
Elintapahoito

Paino (kg)
Syötä paino

Pituus (cm)
Syötä pituus

Peruuta **Lähetä**

Voit nyt muokata ja mukauttaa potilaiden profiilia neljän eri otsikon alla.

- Henkilötiedot
- Terveystiedot
- Tavoitealueet (veren glukoosi)
- Keskeiset tulosindikaattorit (KPI)

Voit vaihtaa eri otsikkoon napsauttamalla sen nimeä.

Kun kaikki muutokset on tehty, napsauta **"Lähetä"** -painiketta tallentaaksesi muutokset.

Käyntimuistiinpanot

- 1 Aloita uusi käynti napsauttamalla “Aloita vastaanotto”-painiketta.
- 2 Kun olet tallentanut muistiinpanot, sulje käynti “Lopeta vastaanotto”-painikkeella.

The screenshot shows the top part of the GlucoContro app interface. At the top, there's a header with the Ascensia Diabetes Care logo, a search bar, and a 'Lataa tiedot mittarista' button. Below the header, there's a patient profile for Petteri Virtanen, 36 years old, with Type 1 Diabetes, on Insulin treatment. A red box highlights the 'Aloita vastaanotto' button in the top right corner.

The screenshot shows the main dashboard of the GlucoContro app. At the top, there's a patient profile for Petteri Virtanen. Below the profile, there are tabs for 'Tulosten kuvaus', 'Merkinnät', and 'Tulosten ajanjakso'. The 'Tulosten kuvaus' tab is selected, showing a summary of blood sugar levels. A red box highlights the 'Lopeta vastaanotto' button in the top right corner. Below the summary, there are two charts: a bar chart for 'VERENSOKERIPITOISUUDEN TASOT' and a line graph for 'VERENSOKERIPITOISUUS'.

VERENSOKERIPITOISUUDEN TASOT

Kategoria	Prosentti	Lukumäärä
>13.9 mmol/L	19% Erittäin korkea	3
>10.0 mmol/L	25% Korkea	4
>3.9-10.0 mmol/L	44% Tavoitealue	7

VERENSOKERIPITOISUUS

Yksikkö: mmol/L

Yhdistä tuloksia

Napsauta haluamasi tietojen tai korostettujen grafiikoiden alueita. Näin luot automaattisesti muistiinpanon sen kohteen perusteella, jota olet napsauttanut, ja se mahdollistaa kommenttiesi lisäämisen.

- Nämä 7 tukiparametriä ovat potilaan arviointia varten:
- Mittauslukemat
 - Mittausten lukumäärä
 - Päivittäiset keskiarvot
 - Päivät ilman mittauksia
- Kokonaistavoitealueiden ulkopuolella olevat lukemat
- Yksittäiset mittaustulokset

Käyntimuistiinpanot

Jos käynti on aloitettu, se näkyy Aktiivisena hoitokäyntinä, mutta voit myös käyttää aiempien käyntien muistiinpanoja valitsemalla ensin pudotusvalikosta käyntipäivämäärän.

Teveydenhuollon ammattilainen voi lähettää viestejä potilaille valitsemalla **“Jaettu”** -kansio.

Yksityinen kansio on alue, jossa terveydenhuollon ammattilaiset voivat jakaa klinikan muistiinpanoja keskenään.

Tähän voit kirjoittaa yleiset suositukset.

Kun lisää muistiinpanoja **“Jaettu”** osioon ja potilaalla on tili, hän saa sähköpostitse ilmoituksen siitä, että terveydenhuollon ammattilainen on lisännyt muistiinpanon. Kaikkiin muistiinpanoihin voi vastata napsauttamalla **“Vastaa”** -painiketta kyseisen viestin vieressä.

Käyntimuistiinpanot-osioon pääsee napsauttamalla kohtaa **“Käyntimuistiinpanot”** tai napsauttamalla potilaan nimen vasemmalla puolella olevia kolmea pistettä ja valitsemalla **“Vierailuhistoria”**

The screenshot displays the GlucoContro app interface for a patient named Petteri Virtanen. The top navigation bar includes a profile icon, a menu icon, and a search bar. The main content area shows the patient's profile, including their name, age (36), diabetes type (Tyypin 1), and treatment (Insuliini). Below this, there are sections for 'Vastaanoton merkinnät' (Visit notes), 'Tulosten kuvaus' (Test results), and 'Verensokeripitoisuuden tasot' (Blood sugar levels). The 'Vastaanoton merkinnät' section shows a list of visits, with the most recent one dated 19/03. The 'Tulosten kuvaus' section displays various test results, including blood sugar levels and HbA1c. The 'Verensokeripitoisuuden tasot' section shows a bar chart of blood sugar levels over time. The 'Vierailuhistoria' (Visit history) section is highlighted with a red box, indicating it is the selected view. The interface is in Finnish and includes various icons and buttons for navigation and data management.


Klinikan asetusten hallinta

Saatavilla: Ohjelmassa on kolme tapaa päästä "Klinikka-asetuksiin"

Vaihtoehdot ovat:

1. Kuvakkeesta "Klinikan asetukset" vasemmalla olevasta valikkopalkista
2. Klinikan otsikosta yläpalkissa
3. Näytön oikean yläkulman valikosta

Klinikka-asetukset ovat näkyvissä niille terveydenhuollon ammattilaisille, joilla on hallintaoikeudet. Asetuksissa voit kutsua lisää terveydenhuollon ammattilaisia ja muokata potilaan verensokerin tavoitearvoja.

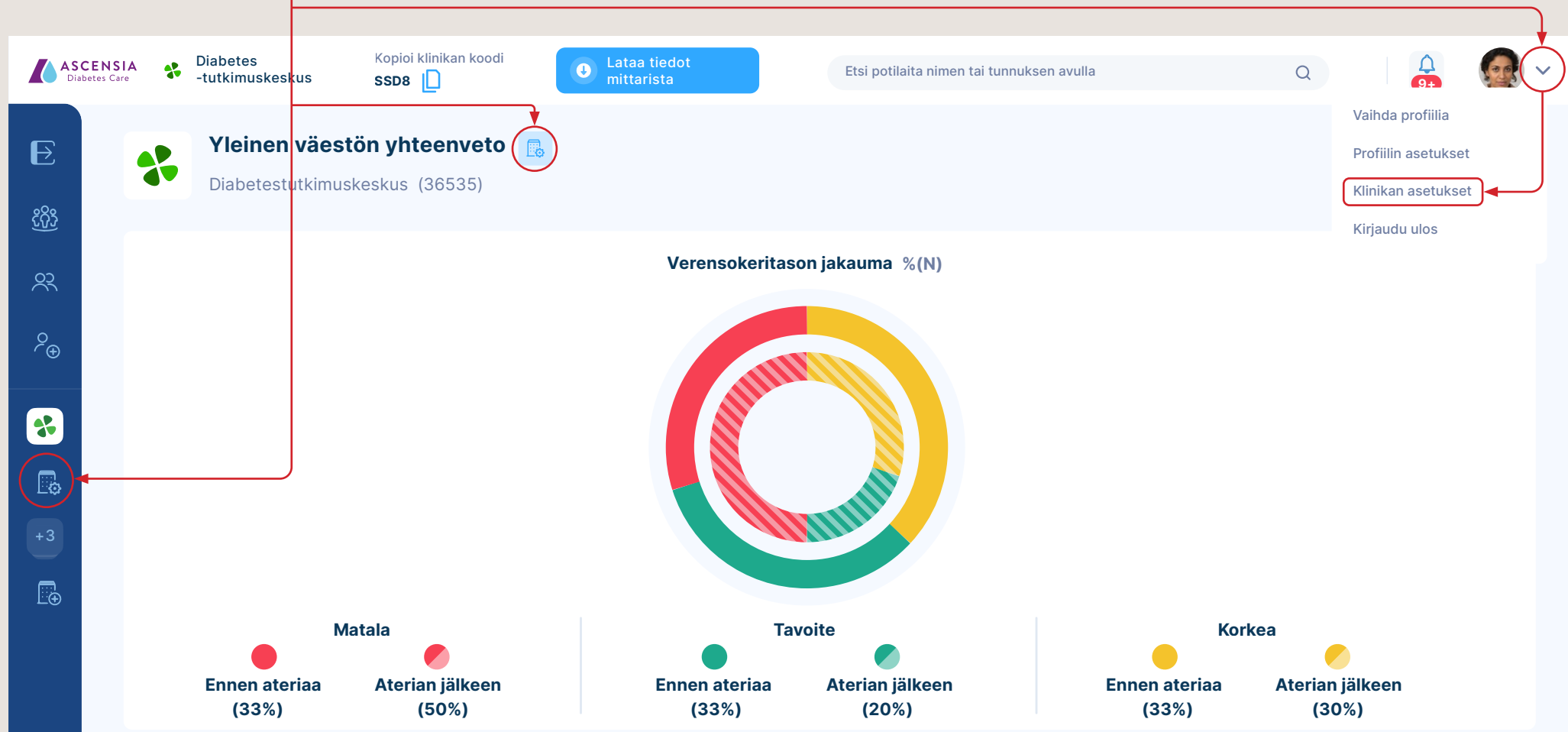

Terveysthuollon ammattilaisen lisääminen

(Hallintaoikeudet tarvitaan)

Valitse **Klinikka-asetukset** ja siirry alaspäin kohtaan Klinikkan terveydenhoitohenkilö.

Napsauta **Lisää terveydenhuollon ammattilainen** ja näytölle avautuu ponnahdusikkuna.

Kirjoita henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Jos haluat myöntää hänelle hallintaoikeudet, merkitse ruutu.

Paina Kutsu -painiketta, ja hän saa kutsun sähköpostitse.

Klinikan ammattilaiset

Ammattilainen

H1

Aki Salmi

Sähköpostiosoite

aki.salmi@dna.fi

Tila

Aktiivinen

Admin

H2

Ella Rautiainen

Sähköpostiosoite

ella.rautiainen@dna.com

Tila

Aktiivinen

+ Lisää ammattilainen

Kutsu ammattilainen

Etunimi

Syötä etunimi

Sukunimi

Syötä sukunimi

Sähköpostiosoite

Syötä sähköpostiosoite

☐ Myönnä järjestelmänvalvojan oikeudet

Kutsu

Mittarilukemien tuonti

The screenshot shows the GlucoContro online application interface. At the top, there is a header with the Ascensia Diabetes Care logo, the text "Diabetes -tutkimuskeskus", and a search bar. A red box highlights the "Lataa tiedot mittarista" button in the top navigation bar. Below this, a modal window titled "Lataa tiedot mittarista" is open, asking "Miten laitteesi muodostaa yhteyden tietokoneeseen?". It lists five connection methods: Sininen USB-kaapeli (with a list of meters: CONTOUR®, CONTOUR®XT), USB-kaapeli (with a list: CONTOUR®CARE, CONTOUR®NEXT, CONTOUR®NEXT ONE), USB-C kaapeli ei saatavilla (with a note: Ei tuettuja laitteita maassasi), Sisäänrakennettu USB (with a list: CONTOUR®NEXT LINK 2.4), and Bluetooth (with a list: CONTOUR®CARE, CONTOUR®NEXT, CONTOUR®NEXT ONE). A red arrow points from the "Lataa tiedot mittarista" button to this modal. To the right, another modal titled "Potilaan tulokset" is shown, displaying the patient's name "Petteri Virtanen" and a "Vaihda potilas" button. Below the name, it shows "CONTOUR® Meter" with the serial number "7803-P030030" and the number of measurements "14". At the bottom of this modal are buttons for "Peruuta tuonti" and "Lataa tulokset". A red arrow points from the "Lataa tiedot mittarista" modal to the "Lataa tulokset" button.

Valitse luettelosta käytettävä mittari ja tapa, jolla haluat ladata lukemat.

Napsauta vastaavaa kuvaketta.

Jos mittaria on käytetty aiemmin, GlucoContro.online tunnistaa potilaan automaattisesti sarjanumeron perusteella, johon se oli linkitetty, ja näyttää potilaan nimen. Jos tämä on ensimmäinen lataus mittarille, ohjelma pyytää valitsemaan potilaan, johon se linkitetään.

Klikkaa **“Lataa tulokset”**-painiketta, jolloin yhdistetyn verensokerimittarin tulokset ladataan ja tiedot avautuvat automaattisesti.

Näytön asettelun yleiskatsaus

Klinikan tiedot

Klinikan tiedot, potilashaku, tietojen latausvaihtoehto, raportin luominen, ilmoitukset ja terveydenhoidon ammattilaisten asetukset ovat kaikki käytettävissä tässä osiossa.

Valikkopalkki

Valikkopalkin voi laajentaa napsauttamalla ylintä kuvaketta.


Kun liikutat hiirtä kuvakkeen päällä, näet painikkeen nimen, näkemistä.

Potilaan tiedot

Potilaan tiedot näkyvät tässä ja voit aloittaa käynnin.

Tietojen valinta

Tiedot voidaan suodattaa nopeasti niiden parametrien perusteella, joilla haluat tarkastella lukemia.

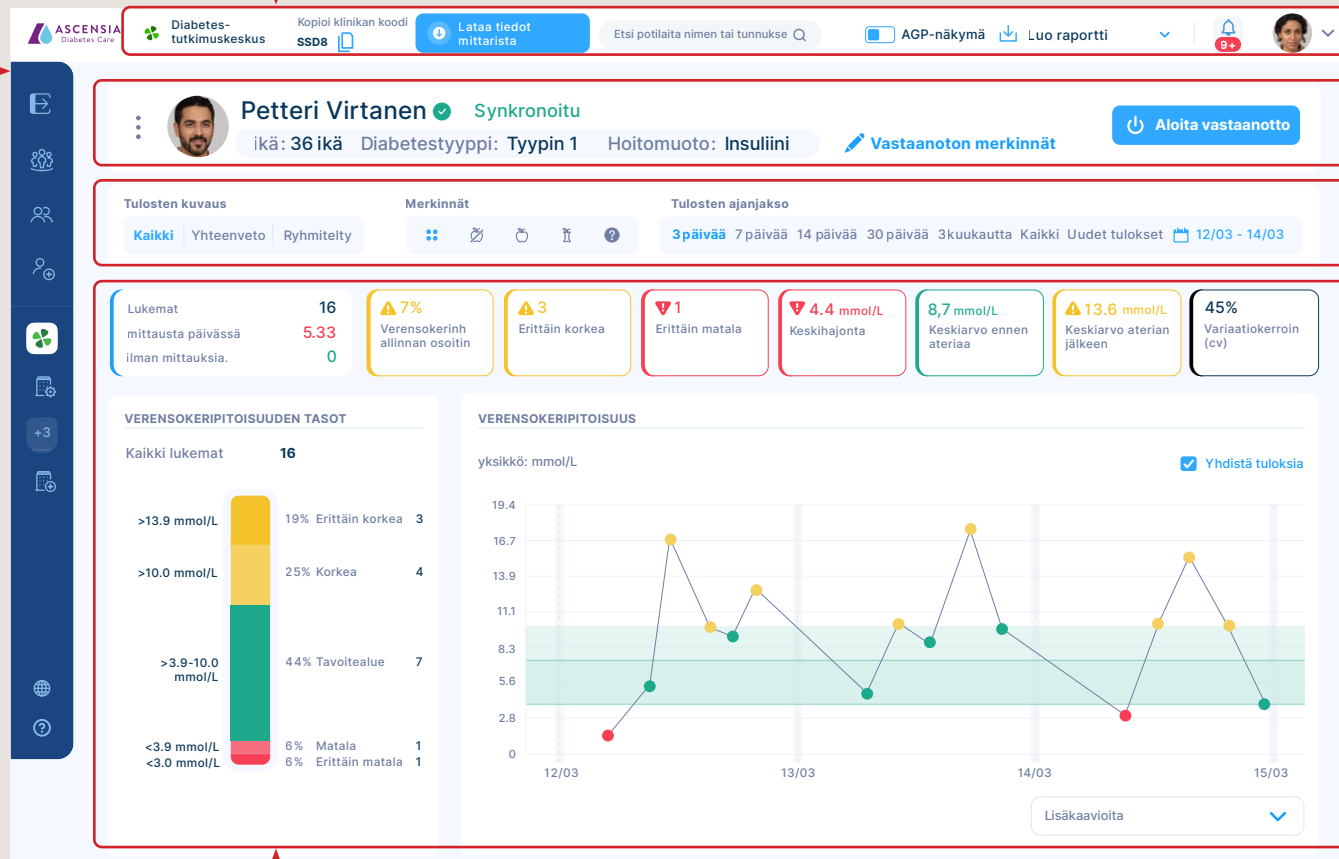

Datanäyttö

Tiedot ja lukemat näytetään valittujen valintakriteerien perusteella.

Tietonäkymien mukauttaminen

Tällä hetkellä näytettävät tulokset on valikossa korostettu sinisellä. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa näkyvät kaikki puretut mittaustulokset kaikilla ateriamerkinnöillä kolmen viimeisen päivän ajalta. Napsauttamalla eri näkymiä tiedot päivittyvät ja voit tarkastella tietoja nopeasti eri tavoilla.

Tulosten kuvaus
Kaikki Yhteenveto Ryhmitelty

Merkinnät
    

Tulosten ajanjakso
3 päivää 7 päivää 14 päivää 30 päivää 3 kuukautta Kaikki Uudet tulokset  12/03 - 14/03

Tulosten kuvaus

Lukemia voidaan tarkastella kaikkia yhdessä, koottuna tai ryhmiteltynä.

Sekä koostetussa että ryhmitellyssä näkymässä sinulla on mahdollisuus valita eri vaihtoehtoja ja ajanjaksoja. Nämä voidaan valita pudotusvalikosta.

Merkinnät

Ateriamerkkien lukemat voidaan valita nopeasti. Tarvittaessa voidaan valita useampi kuin yksi ateriamerkki.

Aikaikkuna

Näytettävien tietojen ajanjaksoa voidaan nopeasti muuttaa napsauttamalla haluttua aikaväliä.

Voit valita kaikki mittaukset, tai vain uudet mittaukset, ja voit valita myös tietyn ajanjakson napsauttamalla päivämääräaluetta.

Tulosten kuvaus
Kaikki **Yhteenveto** Keskiarvo Päivittäinen
Tulosten ajanjakso
3 päivää 7 päivää 14 päivää
Lukemat
mittausta päivässä **5.33** Verensokerinhallinnan osoitin **3** Erittäin korkea



Kaikki



Paasto



Ennen ateriaa



Aterian jälkeen



Ei merkkiä

Raporttien luominen

Luo raportti klikkaamalla painiketta.

Käyttämästäsi järjestelmästä riippuen sinulla on mahdollisuus joko tulostaa kopio raportista tai tallentaa se pdf-tiedostona.

HUOMAUTUS: Luodut raportit perustuvat tarkistettaviksi valittuihin tietoihin, esim. jos on valittu neljäntoista päivän lukemia, raportti perustuu tähän ajanjaksoon.

ASCENSIA Diabetes Care | Diabetes-tutkimuskeskus | Kopioi klinikan koodi SSD8 | Lataa tiedot mittarista | Etsi potilaita nimen tai tunnuksen | AGP-näkymä | **Luo raportti** | 9+ | [Profiili]

Petteri Virtanen ✓ Synkronoitu
ikä: 36 ikä | Diabetestyyppi: Tyypin 1 | Hoitomuoto: Insuliini | Vastaanotto

Tulosten kuvaus | Merkinnot | Tulosten ajanjakso

Kaikki | Yhteenveto | Ryhmitelty

Lukemat | 16 mittausta päivässä | 5.33 ilman mittauksia. | 0

7% Verensokerin hallinnan osoitin | **3** Erittäin korkea | **1** Erittäin matala | **4.4 mmol/L** Keskihajonta

VERENSOKERIPITOISUUDEN TASOT

Kaikki lukemat **16**

>13.9 mmol/L 19% Erittäin korkea **3**

>10.0 mmol/L 25% Korkea **4**

VERENSOKERIPITOISUUS

yksikkö: mmol/L

☒ Yhdistä tuloksia

19.4
16.7
13.9
11.1
8.3

Viestit

ASCENSIA Diabetes Care Diabetes -tutkimuskeskus Kopioi klinikan koodi SSD8 Lataa tiedot mittarista Etsi potilaita nimen tai tunnuksen avulla

Yleinen väestön yhteenveto
Diabetestutkimuskeskus (36535)

Verensokeritason jakauma % (N)

Ilmoitusasetukset

- ☒ Uusi terveydenhuollon ammattilainen on liittynyt klinikalle
- ☒ Potilas hyväksyi kutsun
- ☒ Potilas hylkäsi kutsun
- ☒ Pyyntösi liittyä klinikalle on hyväksytty
- ☒ Uusi klinikalle liittymispyyntö odottaa hyväksyntääsi (vain klinikan järjestelmänvalvojat)
- ☒ Pyyntösi liittyä klinikalle on hylätty
- ☒ Uusi Potilas-profiili on luotu
- ☒ Politaan uudet lukemat on tuotu

[Avaa ilmoitushistoria](#) [Tallenna muutokset](#)

Voit valita millaisia viestejä haluat ottaa vastaan siirtymällä viestivalikkoon.

Valitse tai poista valinta ruuduista mukauttaaksesi valintaasi.

Vanhat viestit näkyvät napsauttamalla viestihistoriapainiketta.


Jos olet saanut viestejä, ilmoitusikonin alle ilmestyy punainen palkki, ja näet myös kuinka monta viestiä sinulla on. Jos haluat lukea viestin, napsauta sinisellä korostettua tekstiä.

ai tunnukse AGP-näkymä Luo raportti

Ilmoitukset

- Diabetestutkimuskeskus-klinikalle on lisätty uusi potilas **Valteri Koski**. [Siirry potilasprofiiliin nyt.](#)
- Diabetestutkimuskeskus-klinikalle on lisätty uusi potilas **Aino Mäkinen**. [Siirry potilasprofiiliin nyt.](#)
- Potilaan **Topi Nieminen** Diabetestutkimuskeskus-klinikalla on ladattu 43 uusia lukemia. [Siirry potilasprofiiliin nyt.](#)
- Aki Salmi** on hyväksynyt kutsusi Diabetestutkimuskeskus-klinikalle.
- Ella Rautiainen** on hyväksynyt kutsusi Diabetestutkimuskeskus-klinikalle.
- Potilaan **Henna Laaksonen** Diabetestutkimuskeskus-klinikalla on ladattu 12 uusia lukemia. [Siirry potilasprofiiliin nyt.](#)
- Diabetestutkimuskeskus-klinikalle on lisätty uusi potilas **Aleksi Järvelä**. [Siirry potilasprofiiliin nyt.](#)
- Diabetestutkimuskeskus-klinikalle on lisätty uusi potilas **Liisa Järvinen**. [Siirry potilasprofiiliin nyt.](#)
- Potilaan **Maija Kallio** Diabetestutkimuskeskus-klinikalla on ladattu 121 uusia lukemia. [Siirry potilasprofiiliin nyt.](#)

Ohje, tuki ja palaute

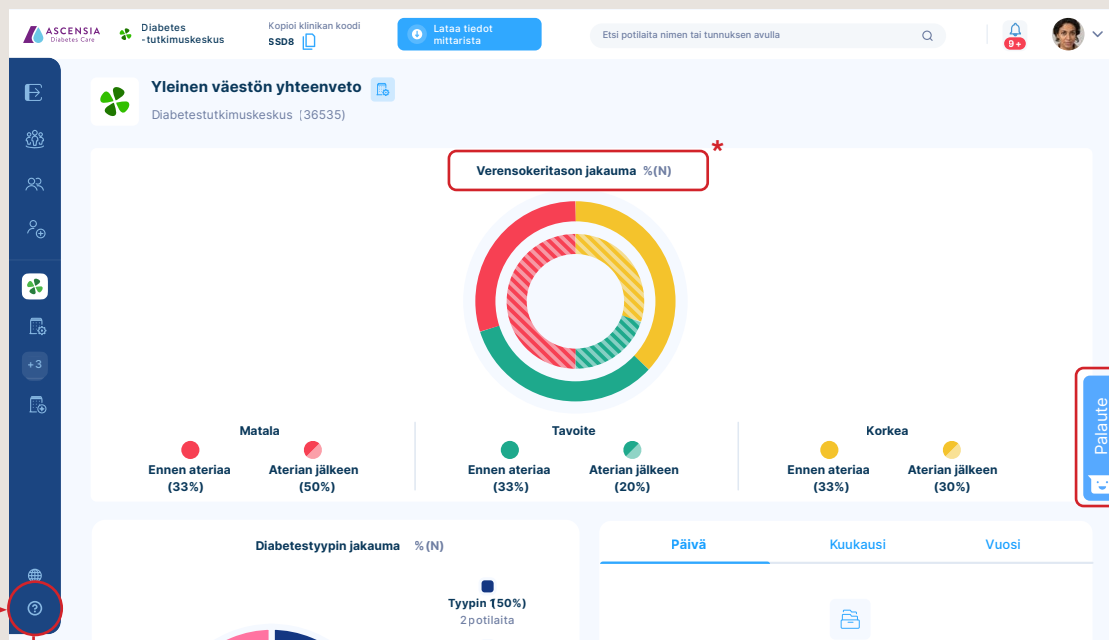

Käyttöoppaisiin ja ohjeosaan pääset napsauttamalla "?" -kuvaketta.

Palaute:

Jos haluat antaa palautetta, voit tehdä sen suoraan GlucoContro.online-palvelussa Napsauta Palaute-painiketta ja valitse sitten sopivin hymiö, joka vastaa kokemustasi. Tämä avaa kommenttikentän, johon voit lisätä palautteesi. Kun olet valmis, paina **"Lähetä"** -painiketta

The screenshot shows the feedback form. The question is 'Miten arvioisit kokemuksiasi?'. There are five emoji options: a sad face, a neutral face, a happy face, a very happy face, and a heart-eyed face. Below the emojis, there is a checkbox labeled 'Etkö ole vielä käyttänyt Hotjar-palvelua?'. A red arrow points from the 'Palaute' button in the dashboard to this form.

The screenshot shows the feedback form. The question is 'Kerro meille kokemuksistasi...'. There is a text input field for the user to enter their feedback. Below the input field, there is a checkbox labeled 'Etkö ole vielä käyttänyt Hotjar-palvelua?'. A red arrow points from the feedback form above to this form.

Tuki

Ascensia Diabetes Care:n asiakaspalvelu
Puhelinnumero: **0800 172 227**
(arkipäivisin kello 8-16)
Sähköposti: **tuotetuki@ascensia.com**

The screenshot shows the GlucoContro online service homepage. It features a search bar with the text 'Hae'. Below the search bar, there are two buttons: 'Käyttöehdot' (Terms of Use) and 'Oppaat' (Guides). Below these buttons, there is a section for 'Mainostetut artikkelit' (Featured articles) with the text 'Kuinka rekisteröidyn GlucoContro.online -ohjelmaan?'. A red arrow points from the help icon in the dashboard to this page.

*Glukoositason jakauma viittaa lukemiin vaihteluvälijakaumassa

SdNcenter on GlucoContro.online laillinen valmistaja ja kehittäjä ja se tekee yhteistyötä Ascensian kanssa ohjelman markkinoinnissa ja toimituksessa terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaskäyttäjille.

© 2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Kaikki oikeudet pidätetään Ascensia, Ascensia Diabetes Care -logo ja Contour ovat Ascensia Diabetes Care Holdings AG:n tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Omia muistiinpanoja

Ascensia Diabetes Care:n yhteystiedot

Asiakaspalvelun maksuton puhelinnumero: **0800 172 227**

Sähköposti: tuotetuki@ascensia.com

Lisätietoja löydät kotisivuiltamme **www.diabetes.ascensia.fi**