

Ole yhteydessä potilaisiin etäyhteyden kautta*



Auta potilaitasi diabeteksen
hallinnassa pyytämällä heitä
jakamaan verensokerituloksensa.

www.glucococontro.online

*Potilaiden on rekisteröidyttävä GlucoContro.onlinessa ja annettava lupa
jakaa tietonsa terveydenhuollon ammattilaisille.

Potilastiedot helposti saatavilla

Tiedot näkyvät yhdellä näytöllä, yhdellä napsautuksella



Ilmoitusnäyttö,
jossa on **tilastot** ja
täydellinen luettelo
rekisteröityneistä
potilaista



Nopea ja helppo pääsy
CONTOUR®CLOUD:in
CONTOUR®DIABETES
-sovellukseen
tallennettuihin tietoihin



Yksilöidyt tiedot
jokaisesta
rekisteröidystä
potilaasta (tavoitealueet,
aikakehykset)



Petteri Virtanen ✓ Synkronoitu

ikä: 36 ikä Diabetestyyppi: Tyyppi 1



Luo raportteja
(mukaan lukien
AGP-raportti*,
PDF, tulostus)




Nopea yhteenveto
tiedoista
värikoodatuilla
kaavioilla



Turvallinen liittymä,
jossa potilaat voivat
jakaa tietoa kanssasi



Lataa tulokset
CONTOUR®-mittareista
ilman pääkäyttäjän lupaa

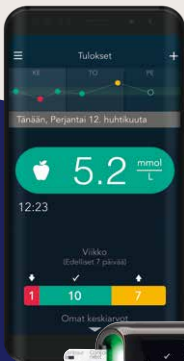

*AGP-glukoosiprofiili (antaa yleiskatsauksen glukoositasojen muutoksista ajan mittaan.)

Huom: Langaton tiedonsiirto
CONTOUR®XT-mittarista ei ole mahdollinen.
Yhdistä laite tietokoneeseen sinisellä
3,5 mm USB-kaapelilla.



Uusi tapa tarkastella veren glukoosipitoisuutta

Helpompi tapa glukoosiarvojen tulkintaan:

Pikavalikko



Yhteenveto: Olennaista tietoa hoitopäätöksen tekoon

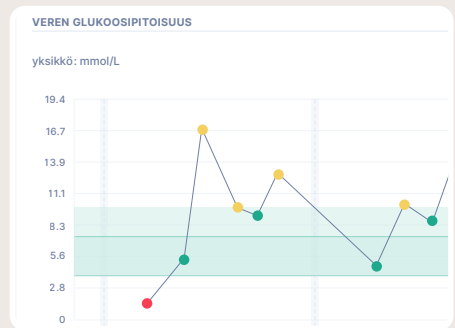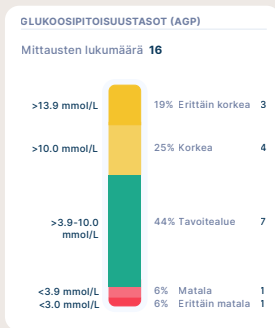

Glukoosipitoisuusalueet:
Näyttää arvot prosentuaalisesti eri pitoisuusalueilla

Glukoosipitoisuuden jakautuminen:
Seuraa glukoosilukemien vaihtelua



Mittaustaulukko:
Yksinkertainen näyttö päivittäin kerätyille tiedoille

	Mittausten lukumäärä	Keskiverto	Mediaani	Keskihajonta	Korkein	Alin	Korkea	Tavoite	Matala
☰ Kaikki	16	9.5 mmol/L	9.9 mmol/L	4.3 mmol/L	16.8 mmol/L	2.3 mmol/L	43.75%	43.75%	12.5%
🌞 Paasto	3	3.8 mmol/L	3.7 mmol/L	1.6 mmol/L	5.4 mmol/L	2.3 mmol/L	0%	33.33%	66.67%
🕒 Ennen ateriaa	3	8.7 mmol/L	9.8 mmol/L	2.4 mmol/L	10.3 mmol/L	5.9 mmol/L	33.33%	66.67%	0%
🍽 Aterian jälkeen	5	13.6 mmol/L	15.0 mmol/L	3.4 mmol/L	16.8 mmol/L	9.4 mmol/L	80%	20%	0%
🚫 Ei määritelmää	5	9.3 mmol/L	9.9 mmol/L	2.9 mmol/L	12.7 mmol/L	4.6 mmol/L	40%	60%	0%

Yhteenveto tuloksista: Tarkempi yhteenveto potilaan verensokeriarvoista

Helppo käyttöönotto ja potilaiden kutsuminen

Helppo 3-vaiheinen rekisteröinti:

1. Käy osoitteessa glucocontro.online ja napsauta rekisteröidy
2. Täytä tiedot
3. Odota hyväksyntää klinikan tietovastaavalta†

Luo tili

Tiilin tyyppi

Potilas

Valitse tämäntyyppinen tili, jos sinulla on diagnosoitu diabetes.

Ammattilainen

Valitse tämäntyyppinen tili, jos olet terveydenhuollon ammattilainen.

Omaishoitaja

Valitse tämäntyyppinen tili, jos haluat hoitaa diabeetikkoa, mutta et ole diabeetikko.


Sähköpostiosoite

Syötä sähköpostiosoite

Etunimi Sukunimi

Syötä etunimi Syötä sukunimi

Napsauta: "Lisää uusi potilas"

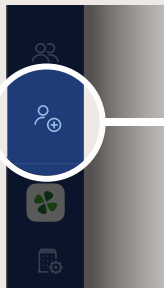

Lisää uusi potilas

Manuaalinen QR koodi

Etunimi Sukunimi

Syötä etunimi Syötä sukunimi


Haluan lähettää sähköpostikutsun tälle potilaalle

Maa

Suomi

Lisätiedot

Lisää uusi potilas

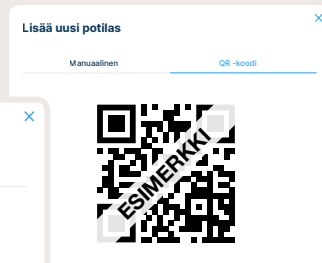

✓ Osoittaa että potilaasi on hyväksynyt kutsun



Petteri Virtanen ✓ Synkronoitu

ikä: 36 ikä Diabetestyyppi: Tyyppi 1



Ascensia Diabetes Care Finland Oy
Hiilikatu 3, 00180 Helsinki
tuotetuki@ascensia.com
Puh. 0800 172 227
www.diabetes.ascensia.fi

† voi kestää 24 tuntia

GlucoContro.online -sovellus on saatavilla sekä suomeksi, että ruotsiksi.

© Copyright 2022. Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care -logo ja Contour ovat Ascensia Diabetes Care -yhtiön tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Play ja Google Play-logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavasti kunkin omistajansa omaisuutta ja niitä käytetään ainoastaan tietojen hankkimiseen.

Valmistuspäivä: Lokakuu 2022. PP-GluCo-GBL-0007.