

# Helppo ja nopea tapa jakaa verensokeritulokset terveydenhuollon ammattilaisen kanssa

Ryhdy CONTOUR®DIABETES-sovelluksen käyttäjäksi ja pidä yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen langattomasti\*

1

Lataa  
CONTOUR®  
DIABETES -  
sovellus



Ladattavissa maksuttomasti



Lataa  
App Storesta

LATAA SE  
Google Playsta

Luettelo yhteensopivista laitteista  
löytyy osoitteesta  
[compatibility.contourone.com](http://compatibility.contourone.com)

2

Luo tili



3

Yhdistä yhdistettävä  
CONTOUR® -  
mittarisi



Löydät lisätietoja sivulta:  
[www.diabetes.ascensia.fi](http://www.diabetes.ascensia.fi)

## Yksinkertainen käyttöönotto, jonka jälkeen voit jakaa verensokeriarvojesi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa etäyhteyden kautta

Odota terveydenhuollon ammattilaisen kutsua

Kutsu sähköpostitse

tai

Kutsu QR-koodin kautta

Saat sähköpostikutsun ja napsautat linkkiä\*



1

Skannaa hoitokäynnin aikana luotu QR-koodi

### Lisää uusi potilas

Manuaalinen QR -koodi

Etunimi Kirjoita etunimi Sukunimi Kirjoita sukunimi

Haluan lähettää sähköpostikutsun tälle potilaalle E-Mail

Osoite Kirjoita sähköpostiosoite

Maa Suomi

Lisätiedot

Lisää uusi potilas

### Lisää uusi potilas

Manuaalinen QR -koodi

2

Kirjaudu CONTOUR®DIABETES -sovellukseen omilla tunnuksillasi: käyttäjätunnus ja salasana.

Potilas Hoitohenkilö

**Contour** Kirjaudu sisään tilillesi käyttämällä Contour Cloud -tunnuksiasi.

Sähköpostiosoite Kirjoita sähköpostiosoite

Salasana Unohditko salasanasasi? Kirjoita salasanasasi

Muista minut

Kirjaudu sisään Eikö sinulla ole tiliä? Rekisteröidy

3

Täytä tietosi



Nyt verensokeritietosi ovat terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla GlucoContro.onlinesivuston kautta.

\*Terveydenhuollon ammattilainen lähettää kutsun



**Ascensia Diabetes Care**  
Finland Oy  
Hiilikatu 3, 00180 Helsinki  
tuotetuki@ascensia.com  
Puh. 0800 172 227  
[www.diabetes.ascensia.fi](http://www.diabetes.ascensia.fi)